



**0,18% Hyaluronsäure  
+ Elektrolyte  
+ Hypoosmolarität  
im innovativen  
Dosierfläschchen**



**Sämtliche Produkte der VISMED-Familie können mit allen Arten von Kontaktlinsen eingesetzt werden. Fragen Sie Ihren Arzt, welches Produkt der VISMED-Familie für Sie das richtige ist. Für zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an! Sie erreichen uns unter:**

VISMED® multi stellt die einmalige Formulierung von VISMED® in einem innovativen Dosierfläschchen zur Verfügung. Es verbindet Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit mit Sicherheit und einfachster Handhabung.

VISMED® multi gibt es in einem konservierungsmittelfreien Dosierfläschchen von 10 ml



Nehmen Sie vor der Anwendung die Schutzkappe vom Fläschchen. Vermeiden Sie jede Berührung der Tropföffnung. Nehmen Sie das Fläschchen so zwischen Daumen und Zeigefinger, dass die Tropföffnung unten liegt und der Daumen diese frei lässt. Vor der ersten Anwendung muss das Ventil mehrfach betätigt werden, bis ein erster Tropfen Lösung ausgeworfen wird. Dazu üben Sie mit dem Zeigefinger Druck auf das Fläschchen aus.

Legen Sie den Kopf leicht in den Nacken und ziehen Sie mit den Fingern der freien Hand das Unterlid etwas nach unten. Halten Sie das Fläschchen so, dass der Daumen mit dem Fläschchen auf den Fingern der anderen Hand aufliegt und die Tropföffnung direkt auf das geöffnete Auge gerichtet ist. Drücken Sie mit dem Zeigefinger das Fläschchen nach unten, um einen Tropfen Lösung auf das Auge aufzubringen. Setzen Sie nach Gebrauch die Schutzkappe auf das Fläschchen.




TRB CHEMEDICA (Austria) GmbH, A-1091 Wien, Porzellangasse 56/II/4, Postfach 36  
Anfragen unter Tel.: 01/319 25 80 11 oder per e-mail: susanne.breuer@trbchemedica.at

1. Auflage 04/06 – AUT

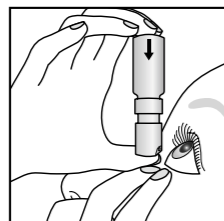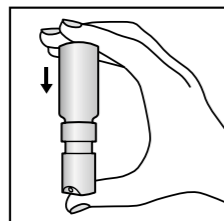

**Müde, brennende, kratzende  
Augen. Und das Gefühl von  
Trockenheit?**

Die Lösung heißt

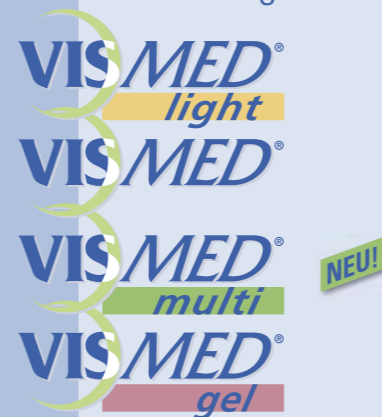

**Tel.: 01/319 25 80 11 oder  
per e-mail: susanne.breuer@trbchemedica.at**

**Sicher:**

- Steril und frei von Konservierungsmitteln
- Neuartiges Ventil, das retrograde Kontamination verhindert

**Wirksam:**

- Bewährte Formulierung mit einmaliger Zusammensetzung: 0,18% Hyaluronsäure und wesentliche Elektrolyte

**Wirtschaftlich:**

- Fast 250 sterile Tropfen aus einem Fläschchen mit 10 ml
- Nach Anbruch 3 Monate verwendbar

**Einfache Anwendung:**

- Keine Überkopfanwendung
- Einfachste Handhabung durch ergonomisches Design
- Besonders konzeptionierter Ventilkopf für eine präzise, reproduzierbare und gezielte Tropfenabgabe

Unsere Behandlungsempfehlung nach dem Stufenschema unseres wissenschaftlichen Beirats:

VISMED® beseitigt Ihre Beschwerden rasch, zuverlässig und für lange Zeit.



VISMED® der Durchbruch in der Applikation von Augentropfen.



### VISMED® *light*

VISMED® *light* enthält 0,1 % Hyaluronsäure. Im Tropffläschchen sind 15 ml enthalten, die Sie über drei Monate (nach Anbruch) aufbrauchen können. Damit ist VISMED® *light* die kostengünstige Alternative für alle Patienten, die

keine hochkonzentrierten Lösungen brauchen und bisher Standardpräparate benutzt haben. Hinzu kommt eine ausgesprochen einfache Handhabung des Fläschchens, das mit wenig Kraftaufwand gut anzuwenden ist.



### VISMED®

Der Klassiker. VISMED® Einmaldosen enthalten 0,18 % Hyaluronsäure und sind damit fast doppelt so stark konzentriert wie VISMED® *light*. VISMED® hat für seine einzigartige

Formulierung ein Patent erhalten, welches in der EU und den Vereinigten Staaten Gültigkeit besitzt. VISMED® enthält neben der Hyaluronsäure noch wichtige Salze zur Ernährung der Hornhaut. Eine besondere Formulierung sorgt außerdem dafür, dass alle Gewebe des Auges mit Feuchtigkeit versorgt werden. VISMED® gibt es in handlichen Einmaldosen, die Sie auch unterwegs leicht einsetzen können. Für eine besonders zuverlässige Wirkung bei Trockenheitsgefühl der Augen empfehlen wir VISMED®.



### VISMED® *multi*

VISMED® *multi* entspricht in der Zusammensetzung dem Klassiker VISMED®, wird aber in einem absolut neuartigen und patentierten Mehrfach-Dosierungssystem angeboten. Dadurch können Sie auf ein handliches Fläschchen zurückgreifen, welches in der Handhabung ausgesprochen einfach ist und

dessen Inhalt nach Anbruch drei Monate verwendet werden kann. Durch das innovative Dosiermodell kommt VISMED® *multi* ohne Konservierungsmittel aus. Dadurch wird die Anwendung von VISMED® *multi* sehr wirtschaftlich, ohne dass Sie auf die Vorteile von VISMED® verzichten müssen.



### VISMED® *gel*

VISMED® *gel* ist durch seinen höheren Gehalt an Hyaluronsäure (0,3 %, ungefähr die doppelte Konzentration von VISMED®) die Lösung zur nachhaltigen Linderung von hartnäckigen Beschwerden am Auge. Tests haben ergeben, dass

Lösungen mit höheren Hyaluronsäurekonzentrationen eine deutlich längere Verweildauer auf dem Auge haben und sowohl die Schichtdicke als auch die Stabilität des Tränenfilms erhöhen. Auch VISMED® *gel* enthält Elektrolyte und versorgt – wie VISMED® – das Gewebe mit Feuchtigkeit. Wegen der hohen Konzentration fühlt sich VISMED® *gel* auf dem Auge besonders seidenweich an und muss seltener getropft werden. VISMED® *gel* wird in Einmaldosen angeboten, die eine einfache Dosierung garantieren.